

Sûr Rapide Facile



La solution à un problème vécu par le personnel médical du monde entier

Chaque jour, des millions de biopsies sont effectuées dans les hôpitaux et les cliniques. Ce processus implique généralement l'utilisation de formol qui présente un risque sérieux pour la santé.

BiopSafe offre une solution efficace à ce problème. C'est une méthode nouvelle et révolutionnaire pour réaliser des biopsies assurant la protection du personnel médical dans le monde entier. Le flacon BiopSafe permet une manipulation du formol en toute sécurité à l'aide d'une simple pression du pouce.

La solution est aussi simple qu'efficace

Dans les hôpitaux et les cliniques du monde entier, le grand défi est de savoir comment conserver l'échantillon biopsique dans le formol tout en évitant que ce dernier ne se déverse ou s'évapore.

Ce problème est résolu grâce à BiopSafe - un petit récipient contenant du formol comprimé dans le couvercle. Par une légère pression du pouce, le formol est libéré dans un système fermé recouvrant l'échantillon de la biopsie. Résultat : aucun personnel n'est exposé au contenu, qu'il soit sous forme liquide ou de vapeurs.

- Le formaldéhyde comprimé dans le couvercle
- S'utilise par une simple pression de pouce
- Aucun personnel n'est exposé



Rapide et facile

En plus d'être sûre, la méthode est également rapide. BiopSafe est toujours à portée de main. Il ne suffit que de quelques secondes pour placer l'échantillon biopsique dans le flacon et appuyer pour ajouter le formol. Cette manipulation simple représente un gain de temps et permet aux médecins et aux infirmières de se concentrer sur d'autres problèmes importants. De plus, le transport vers le laboratoire est sécurisé et facile.

2 formats

Il existe 2 formats de flacons : 20 ml et 60 ml. Cela facilite la manipulation de plusieurs biopsies à la fois. Chaque échantillon biopsique peut être placé dans une cassette et disposé avec d'autres cassettes dans un flacon avant que le couvercle ne soit vissé et le formol libéré.

Manipulation sûre de la biopsie en 6 étapes

En seulement quelques secondes et en toute sécurité, la biopsie est recouverte de formol et prête pour le transport.

Tout se déroule dans un système hermétiquement fermé sans aucun déversement ni vapeur s'échappant du flacon.

1



Dévissez le couvercle

2



Placez les prélèvements de la biopsie dans le flacon

3



Vissez le couvercle et serrez

4



Appuyez avec le pouce. Le formol est libéré.

5



L'échantillon de la biopsie est immergé dans le formol

6



La biopsie est prête pour un transport en toute sécurité



Rendez-nous visite sur BiopSafe.com

Biopsafe* - Votre protection au quotidien



Le formaldéhyde est un carcinogène humain connu ayant de nombreux impacts négatifs sur la santé. Soit lorsqu'une personne est exposée directement, soit par inhalation. Il a été prouvé qu'une exposition au formaldéhyde à long terme est associée à un risque accru de cancer du nez, du nasopharynx et du poumon.

Une exposition à court terme peut également entraîner de graves risques pour la santé :

Inhalation : Une exposition accrue au formaldéhyde peut provoquer de graves réactions pulmonaires aux voies respiratoires supérieures

Les yeux : Irritation entraînant des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures et des déchirures

Peau : Réaction allergique et dermatite - de nombreuses personnes en ont fait l'expérience en travaillant avec du formaldéhyde.

Il est donc essentiel de manipuler le formol avec soin et précaution pour garantir un environnement de travail sûr.

**Biopsafe® suit la réglementation de l'UE sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Biopsafe® possède le marquage CE et est conforme à la réglementation CE.*

Selon le règlement (CE) no 1272/2008 (dernière version 14 nov 2020) du parlement européen et du conseil : le formaldéhyde est déclaré comme cancérigène de classe 1b et comme mutagénique de classe 2

Selon la directive 2004/37 / CE (dernière version 26 juil 2019) du parlement européen et du conseil : l'employeur doit s'assurer que le cancérigène ou le mutagène soit techniquement, dans la mesure du possible, fabriqué et utilisé dans un système fermé

Rendez-nous visite sur BiopSafe.com




Qui sommes-nous ?

Axlab a été fondée en 1993. Elle est spécialisée dans la distribution d'équipements avancés de pathologie de laboratoire. Pendant plus d'une décennie, Axlab a observé les défis du personnel travaillant dans la bio-analyse et la pathologie dans la manipulation de biopsies utilisant du formaldéhyde dans des systèmes ouverts.

Ils ont observé un besoin clair d'une plus grande protection au quotidien. Le fondateur a développé une nouvelle solution innovante éliminant l'exposition au formaldéhyde dangereux, protégeant les médecins et les infirmières du monde entier. Cette innovation unique a ouvert la voie à la création d'une nouvelle entreprise. BiopSafe a été fondée en 2014.

BiopSafe dispose d'un réseau spécialisé de distribution mondial.

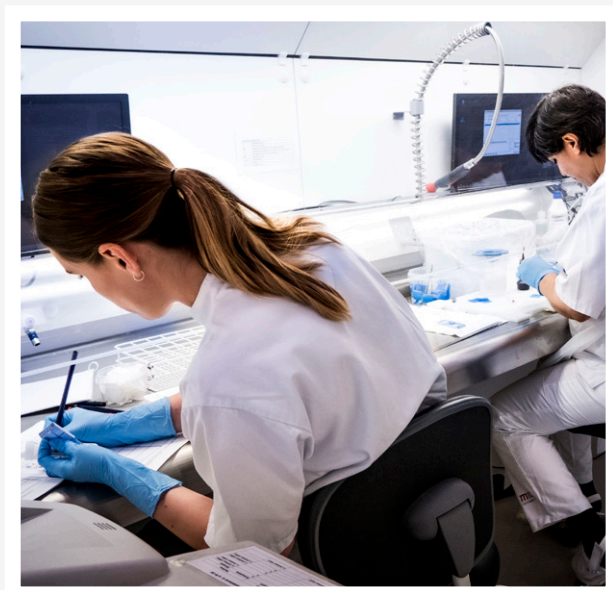

Rendez-nous visite sur [BiopSafe.com](https://www.biopsafe.com)